

Messgröße/ Normal- bzw. Referenzbereich	EDV	Probe	Methode
<p><b>Kalium</b></p> <p><b>25 - 125 mmol/24 Std.</b></p> <p>24-Std.-Urin in braunem 2-Liter-Gefäß sammeln. Kein Konservierungsmittelzusatz erforderlich. Gesamte Urinmenge abgeben oder: Gesamtmenge gut mischen, exakt abmessen (Messzylinder!), Sammelvolumen angeben und 10 ml der Sammelmenge in das Institut schicken.</p> <p>Probengefäß: 2-Liter-Sammelgefäß oder Urinmonovette, gelb (10 ml)</p>	<p>UKc</p> <p>UK</p>	<p>Spontanurin</p> <p>24-Std.-Urin</p>	<p>Ionenselektive Elektrode</p>
<p><b>Kappa-Leichtketten, freie</b> siehe freie Kappa-Leichtketten</p>			

<p><b>Katecholamine</b> <span style="float: right;">LP 570</span></p> <p><b>Dopamin</b>            <b>390 - 2630 nmol/24 Std.</b></p> <p><b>Nor-adrenalin</b>        <b>90 - 470 nmol/24 Std.</b></p> <p><b>Adrenalin</b>            <b>&lt; 110 nmol/24 Std.</b></p> <p>Starke körperliche Aktivität erhöht die Katecholaminausscheidung. Es besteht eine ausgeprägte tageszeitabhängige Katecholaminausscheidung (deshalb: 24-Stunden-Sammelmenge).</p> <p>24-Std.-Urin in braunem 2-Liter-Gefäß sammeln. Zur ersten Urinportion 20 ml 20% HCL zugeben. Gesamte Urinmenge im Institut abgeben oder: Gesamtmenge gut mischen, exakt abmessen (Messzylinder!), Sammelvolumen angeben und 10 ml der Sammelmenge in das Institut schicken.</p> <p>Probengefäß: 2-Liter-Sammelgefäß oder Urinmonovette, gelb (10 ml)</p>	<p>UDOP</p> <p>UNAD</p> <p>UADR</p>	<p>24-Std.-Urin</p>	<p>Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) mit elektrochemischer Detektion (ECD)</p>
<p><b>Kupfer</b></p> <p>Fremdleistung</p> <p>24-Std.-Urin in braunem 2-Liter-Gefäß sammeln. Kein Konservierungsmittelzusatz erforderlich. Gesamte Urinmenge abgeben, oder: Gesamtmenge gut mischen, exakt abmessen (Messzylinder!), Sammelvolumen angeben und 10 ml der Sammelmenge in das Institut schicken.</p> <p>Probengefäß: 2-Liter-Sammelgefäß oder Urinmonovette, gelb (10 ml)</p>	<p>FV189U</p>	<p>24-Std.-Urin</p>	